




Görüntü kurtarma

Sorun: Görüntü DR dedektörü kullanılarak alındı ancak muayenede gösterilmiyor.



UYARI:

DR dedektör veya röntgen sistemini kapatmayın! Görüntü kaybolur.

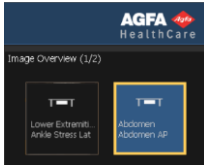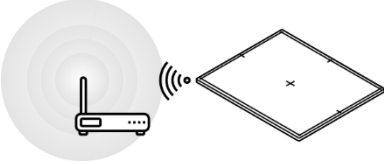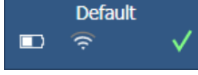


1. **WiFi bağlantı durumunu kontrol edin ve DR dedektörü WiFi erişim noktasına veya mobil röntgen ünitesine yaklaştırın.**

2. **Aynı DR dedektör için başka bir boş küçük resim seçin. Herhangi biri uygun değilse yeniden oluşturun.**

Bu, sistemin dedektörden eksik görüntüyü almasını sağlar.

3. **Başlık çubuğunda kurtarılan görüntüyü içeren yeni bir muayene gösterilmelidir.**

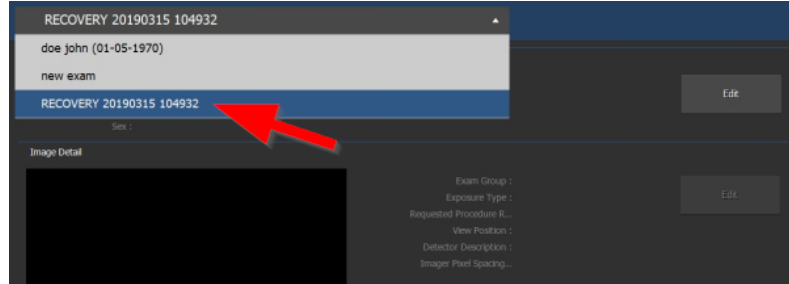

Muayene penceresindeki **Oturumu Aktar** düğmesini kullanarak görüntüyü doğru hastaya aktarın.

NX'i yeniden başlatmak için **MUSICA Acquisition Workstation Control Center** > NX'e gidin ve NX'i **Tamamen Yeniden Başlat**'ı tıklayın.

Dedektörü kapatmak için pili çıkarın.
Dedektörü açmak için pili takın.

4. **3 dakika sonrasında bir görüntü NX üzerinde görüntülenmiyorsa NX'i yeniden başlatın.**

5. **Görüntü NX'de hala görüntülenmiyorsa dedektörü yeniden başlatın.**

Görüntü kurtarılamaz. Sorunu incelemek için yerel destek organizasyonunuz ile iletişime geçin.

Dedektörün başlatılması

Dedektörün **açma/kapatma düğmesiyle** işlem yapmak için keskin nesneler veya kalem/tükenmez kalem kullanmayın.

Dedektörü başlatırken NX iş istasyonuna bağlı **kızılötesi bağlantı noktasının** menzili dışında tutun.

Görüntü kurtarma

Sorun: Görüntü DR dedektörü kullanılarak alındı ancak muayenede gösterilmiyor.



UYARI:
DR dedektör veya röntgen sistemini kapatmayın! Görüntü kaybolur.



UYARI:
Başka bir DR dedektör için bir küçük resim SEÇMEYİN! Görüntü kaybolur.



UYARI:
NX'i yeniden BAŞLATMAYIN! Görüntü kaybolur!



1. WiFi bağlantı durumunu kontrol edin ve DR dedektörü WiFi erişim noktasına veya mobil röntgen ünitesine yaklaştırın.

Bu, dedektörden bir görüntü kurtarma işlemini başlatır.

2. Küçük resimde, kurtarılan görüntü gösterilmelidir.

NX'i yeniden başlatmak için **MUSICA Acquisition Workstation Control Center** > NX'e gidin ve NX'i **Tamamen Yeniden Başlat**'ı tıklayın.

3. 10 dakika sonra görüntü NX'de görüntülenmezse NX'i ve dedektörü yeniden başlatın.

Görüntü kurtarılamaz. Sorunu incelemek için yerel destek organizasyonunuz ile iletişime geçin.



Görüntü kurtarma

Sorun: Görüntü DR dedektörü kullanılarak alındı ancak muayenede gösterilmiyor.



UYARI:

DR dedektör veya röntgen sistemini kapatmayın! Görüntü kaybolur.

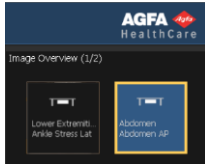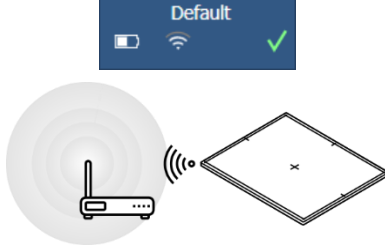


1. **WiFi bağlantı durumunu kontrol edin ve DR dedektörü WiFi erişim noktasına veya mobil röntgen ünitesine yaklaştırın.**

2. **Aynı DR dedektör için başka bir boş küçük resim seçin. Herhangi biri uygun değilse yeniden oluşturun.**

Bu, dedektörden bir görüntü kurtarma işlemini başlatır.

3. **Başlık çubuğunda kurtarılan görüntüyü içeren yeni bir muayene gösterilmelidir.**

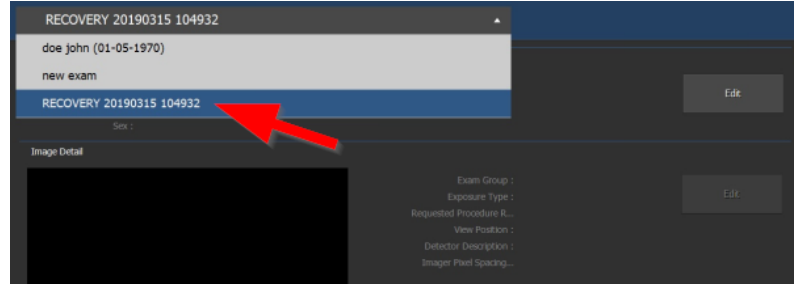

Muayene penceresindeki **Oturumu Aktar** düğmesini kullanarak görüntüyü doğru hastaya aktarın.

NX'i yeniden başlatmak için **MUSICA Acquisition Workstation Control Center** > NX'e gidin ve **NX'i Tamamen Yeniden Başlat**'ı tıklayın.

4. **3 dakika sonrasında bir görüntü NX üzerinde görüntülenmiyorsa NX'i yeniden başlatın.**

5. **Görüntü NX'de hala görüntülenmiyorsa dedektörü yeniden başlatın.**

Görüntü kurtarılamaz. Sorunu incelemek için yerel destek organizasyonunuz ile iletişime geçin.

Dedektörün başlatılması

Dedektörün **açma/kapatma düğmesiyle** işlem yapmak için keskin nesneler veya kalem/tükenmez kalem kullanmayın.